

DENTSPLY
DETREY

Calibra™

αισθητική ρητινώδης κονία



Αισθητική ρητινώδης κονία

Όψεις

Ένθετα και Επένθετα

Στεφάνη και Γέφυρα

από Ολοκεραμικό, Πορσελάνη, Σύνθετη ρητίνη

Στεφάνη και Γέφυρα

Μεταλλοκεραμικά

Άξονες

Γέφυρες τύπου Maryland

**ΜΩΡΙΣ
ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.**

Όψεις

Ένθετα
και Επένθετα

Στεφάνη
και γέφυρα

Στεφάνη
και γέφυρα

Αξονες

Γέφυρες τύπου
Meryland



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ

1. Επαλείφετε εσωτερικά την όψη με Δοκιμαστική Πάστα Calibra και την εφαρμόζετε στο δόντι για να ελέγχετε το χρώμα. Έπειτα απομακρύνετε την όψη.




ΕΔΡΑΣΗ

8. Αν είναι δυνατόν, τοποθετείτε ταινίες σελιλόντη στα μεσοδόντια διαστήματα. Εφαρμόζετε αργά την αποκατάσταση πάνω στο παρασκευασμένο δόντι.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

2. Καθαρίζετε επιμελώς όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της όψης με σπρέι νερού και στεγνώνετε.

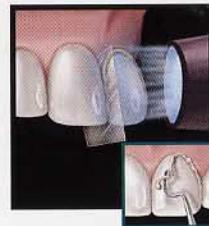

ΠΡΟ-ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΣ

9. Στερεώνετε την όψη πάνω στο παρασκευασμένο δόντι και φωτοπολυμερίζετε την περιοχή γύρω από τα ούλα έως 10°. Απομακρύνετε τις ταινίες σελιλόντη και την περίσσεια κονίας από τα όρια.




ΣΙΛΑΝΟΠΟΙΗΤΗ

3. Τοποθετείτε Σιλανοποιητή Silane Coupling Agent στην όψη σύμφωνα με τις οδηγίες.



ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

10. Φωτοπολυμερίζετε τα όρια της αποκατάστασης επί 20° γλωσσικά, παρειακά και στα μεσοδόντια σημεία επαφής.

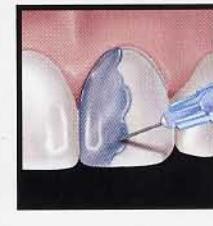

ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ

4. Αφήνετε το De Trey Conditioner 36% στην εναπομένουσα αδμαντίνη (και στην οδοντίνη αν χρειάζεται) επί 15''. Ξεπλένετε επί 10''. Στεγνώνετε με κοφτές κινήσεις βαμβακολαβίδας χωρίς τριβή για να μην αφυδατώσετε το δόντι.



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

11. Ολοκληρώνετε τη λείανση και τη στήλβωση με το Σύστημα Enhance.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ

5. Επαλείφετε άφθονη ποσότητα συγκολλητικού Prime & Bond NT στο δόντι μέχρι να υγρανθεί καλά η επιφάνειά του. Αυτή η επιφάνεια πρέπει να παραμένει υγρή επί 20'', οπότε μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε επιπλέον συγκολλητικό. Στεγνώνετε ήπια επί 5''. Η επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη, στιλπνή εμφάνιση. Διαφορετικά, επαναλαμβάνετε με Prime & Bond NT. Φωτοπολυμερίζετε το Prime & Bond NT επί 10''.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΨΗ

6. Τοποθετείτε ένα επίστρωμα συγκολλητικού Prime & Bond NT στην όψη. Στεγνώνετε αμέσως επί 5''.




CALIBRA

7. Τοποθετείτε την επιθυμητή απόχρωση Calibra απευθείας στην όψη.

Προστατεύετε την κονία από το φως.

Ένθετα και Επένθετα

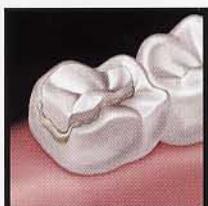

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ (προαιρετικά)

1. Προαιρετικά, επαλείφετε την αποκατάσταση με Δοκιμαστική Πάστα Calibra και την εφαρμόζετε στο δόντι για να ελέγξετε το χρώμα. Έπειτα απομακρύνετε την αποκατάσταση.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7. Τοποθετείτε ένα επίστρωμα από το μίγμα Prime & Bond NT με Self Cure Activator στις επιφάνειες συγκόλλησης της αποκατάστασης. Στεγνώνετε αμέσως επί 5".

Οψεις



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ (προαιρετικά)

2. Αν έχετε χρησιμοποιήσει Δοκιμαστική Πάστα, καθαρίζετε επιμελώς όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της αποκατάστασης με σπρέι νερού και στεγνώνετε.



ΜΙΓΜΑ CALIBRA ΒΑΣΗ+ΚΑΤΑΛΥΤΗ

8. Τοποθετείτε ίσες ποσότητες από την επιθυμητή απόχρωση της βάσης Calibra και από τον καταλύτη Κανονικού ή Υψηλού Ιεώδους σε μπλοκ μίξης. Αναμιγνύετε επί 10-20" μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιόμορφο.

Ελάχιστος χρόνος εργασίας: 2:30.

Ένθετα
και Επένθετα



ΣΙΛΑΝΟΠΟΙΗΤΗ

3. Τοποθετείτε Σιλανοποιητή Silane Coupling Agent στις επιφάνειες συγκόλλησης της αποκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες.



CALIBRA

9. Τοποθετείτε λεπτό στρώμα κονίας Calibra σε όλες τις επιφάνειες συγκόλλησης της αποκατάστασης.


Συμβούλη : Μερικές φορές είναι ευκολότερο να τοποθετείτε λεπτό στρώμα κονίας στις εσωτερικές πλευρές του παρασκευασμένου δονπού για να αποφεύγετε τη δημιουργία πόρων και φυσαλίδων.

Στεφάνη
και γέφυρα



ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ

4. Αφήνετε το De Trey Conditioner 36% στην εναπομείνουσα αδαμαντίνη (και στην οδοντίνη αν χρειάζεται) επί 15''. Ξεπλένετε επί 10''. Στεγνώνετε με κοφτές κινήσεις βαμβακολαβίδας χωρίς τριβή για να μην αφυδατώσετε το δόντι.

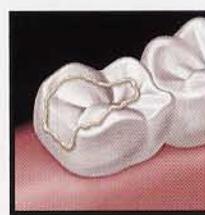

ΕΔΡΑΣΗ

10. Εφαρμόζετε αργά την αποκατάσταση. Πιέζετε προς τα κάτω και απομακρύνετε την περίσσεια κονίας από τα όρια με στεγνό πινελάκι.

Στεφάνη
και γέφυρα



ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΜΙΓΜΑ PRIME & BOND NT με SELF CURE ACTIVATOR

5. Τοποθετείτε 1-2 σταγόνες Prime & Bond NT Διπλού Πολυμερισμού και ίση ποσότητα Αυτοπολυμεριζόμενου Ενεργοποιητή σε μπωλ μίξης και αναμιγνύετε με ένα καθαρό πινέλο.



ΠΡΟ-ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

11. Προ-φωτοπολυμερίζετε τα όρια επί 10'' ώστε να σκληρυνθεί η περίσσεια της κονίας και να καθαρίζεται εύκολα. Απομακρύνετε την περίσσεια κονίας από τα όρια.

Αξονες



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ


6. Επαλείφετε το μίγμα Prime & Bond NT στο δόντι μέχρι να μηρανθούν καλά οι επιφάνειες του. Αυτές οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν υγρές επί 20'', οπότε μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε επιπλέον συγκόλλητικό.

Στεγνώνετε ήπια επί 5''. Η επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη, στιλπνή εικανίσιη. Διαφορετικά, επαναλαμβάνετε την επάλειψη. Φωτοπολυμερίζετε το μείγμα Prime & Bond NT επί 10''.



ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

12. Οταν σταθεροποιηθεί, φωτοπολυμερίζετε όλα τα όρια της αποκατάστασης επί 20'' γλωσσικά, παρειακά και στη μασητική επιφάνεια. Πιέζετε ελαφρά κατά τη διάρκεια του αυτοπολυμερισμού (6:00).

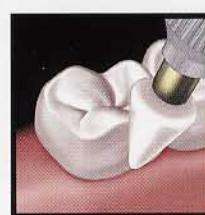


ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

13. Ολοκληρώνετε τη λείανση και τη στίλβωση με το Σύστημα Enhance της DENTSPLY.

Γέφυρες τύπου
Meryland

Στεφάνη και γέφυρα από Ολοκεραμικό, Πορσελάνη, Σύνθετη ρητίνη

Όψεις

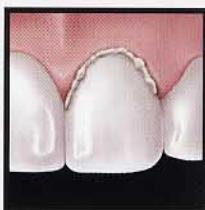


Ενθετα
και Επένθετα



Στεφάνη
και γέφυρα



Άξονες

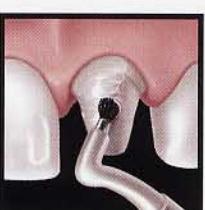

Γέφυρες τύπου
Meryland



ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ

1. Επαλείφετε εσωτερικά τη στεφάνη με Δοκιμαστική Πάστα Calibra και την εφαρμόζετε για να ελέγχετε το χρώμα. Έπειτα απομακρύνετε την αποκατάσταση.



8. Τοποθετείτε ίσες ποσότητες της επιθυμητής απόχρωσης της βάσης Calibra και του καταλύτη σε μπλοκ μίξης. Αναμιγνύετε για 20-30'' μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιόμορφο. (Για πλήρεις στεφάνες συνιστάται Κανονικό Ιεώδες.) Ελάχιστος χρόνος εργασίας : 2:30.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

2. Καθαρίζετε επιμελώς όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της στεφάνης με σπρέι νερού και στεγνώνετε.




CALIBRA

9. Τοποθετείτε ένα λεπτό στρώμα κονίας Calibra στην εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης.




ΕΔΡΑΣΗ

10. Εφαρμόζετε αργά την αποκατάσταση. Πιέζετε προς τα κάτω και απομακρύνετε την περίσσεια κονίας από τα όρια με στεγνό πινελάκι.

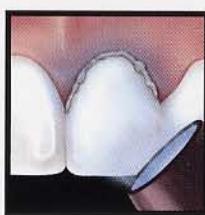

ΠΡΟ-ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

11. Προ-φωτοπολυμερίζετε τα όρια επί 10'' ώστε να σκληρυνθεί η περίσσεια της κονίας και να καθαρίζεται εύκολα.

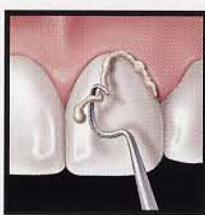

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΣ

12. Απομακρύνετε την περίσσεια κονίας από τα όρια.



ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

13. Όταν σταθεροποιηθεί, φωτοπολυμερίζετε όλα τα όρια της αποκατάστασης επί 20'' γλωσσικά, παρειακά και στα μεσοδόντια σημεία επαφής.

Πιέζετε ελαφρά κατά τη διάρκεια του αυτοπολυμερισμού (6:00).



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

14. Ολοκληρώνετε τη λείανση και τη στήλβωση με το Σύστημα Enhance.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ

6. Επαλείφετε το μίγμα Prime & Bond NT στο δόντι μέχρι να υγρανθούν καλά οι επιφάνειες του. Αυτές οι επιφάνειες πρέπει να παραμένουν υγρές επί 20'', οπότε μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε επιπλέον συγκολλητικό.

Στεγνώνετε ήπια επί 5''. Η επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη, σταλπή εμφάνιση. Διαφορετικά, επαναλαμβάνετε την επάλεψη. Φωτοπολυμερίζετε το μίγμα Prime & Bond NT Πολυμερισμού επί 10''.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7. Τοποθετείτε ένα επίστρωμα από το μίγμα Prime & Bond NT στην εσωτερική επιφάνεια της στεφάνης. Στεγνώνετε αμέσως επί 5''.

(Μεταλλοκεραμικά) ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ



ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ


1. Αφήνετε το De Trey Conditioner 36% στην εναπομείνουσα αδαμαντίνη (και στην δοντίνη αν χρειάζεται) επί 15''. Ξεπλένετε επί 10''. Στεγνώνετε με κοφτές κινήσεις βαμβακολαβίδας χωρίς τριβή για να μην αφυδατώσετε το δόντι.

Για πλήρους-κάλυψη στεφάνες, δεν συνιστάται αδροποίηση της οδοντίνης για να μειώνονται οι πιθανότητες μετεμφρακτικής ευαισθησίας.



ΜΙΓΜΑ PRIME & BOND NT με SELF CURE ACTIVATOR


2. Τοποθετείτε 1-2 σταγόνες Prime & Bond NT και ίση ποσότητα Αυτοπολυμεριζόμενου Ενεργοποιητή σε μπωλ μίξης και αναμιγνύετε με καθαρό πινέλο.

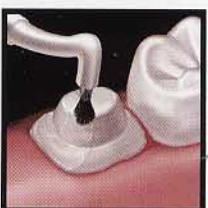

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ

3. Επαλείφετε το μίγμα Prime & Bond NT στο δόντι μέχρι να υγραθούν καλά οι επιφάνειές του. Αυτές οι επιφάνειες πρέπει να παραμείνουν υγρές επί 20'', οπότε μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε επιπλέον συγκολλητικό.

Στεγνώνετε ήπια επί 5''. Η επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη, στηλπή εμφάνιση. Διαφρετικά, επαναλαμβάνετε την επάλειψη. Φωτοπολυμερίζετε το μίγμα Prime & Bond NT επί 10''.

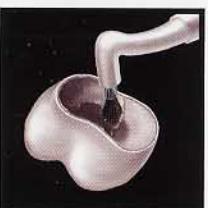


ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΗ

4. Τοποθετείτε ένα επίστρωμα από το μίγμα Prime & Bond NT στην εσωτερική επιφάνεια της στεφάνης. Στεγνώνετε αμέσως επί 5''.




ΜΙΓΜΑ CALIBRA

5. Τοποθετείτε ίσες ποσότητες της επιθυμητής απόχρωσης της βάσης Calibra και του καταλύτη Κανονικού Ιεώδους σε μπλοκ μίξης. Αναμιγνύετε επί 20-30'' μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιόμορφο. Ελάχιστος χρόνος εργασίας : 2:30.

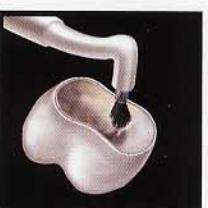

CALIBRA

6. Τοποθετείτε ένα λεπτό στρώμα κονίας Calibra σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης.

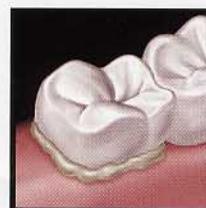

ΕΔΡΑΣΗ

7. Εφαρμόζετε αργά την αποκατάσταση. Πιέζετε προς τα κάτω.


Όψεις



ΠΡΟ-ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ


8. Προ-φωτοπολυμερίζετε τα όρια επί 10'' ώστε να σκληρυνθεί η περίσσεια της κονίας και να καθαρίζεται εύκολα.

Ενθετα
και Επένθετα

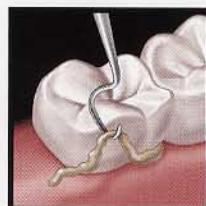

ΠΕΡΙΣΣΕΙΣ


9. Απομακρύνετε την περίσσεια κονίας από τα όρια.

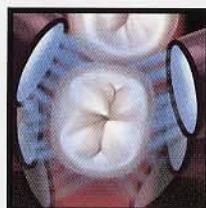

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

10. Όταν σταθεροποιηθεί, φωτοπολυμερίζετε όλα τα όρια της αποκατάστασης επί 20'' γλωσσικά και παρειακά.
Πιέζετε ελαφρά κατά τη διάρκεια του αυτοπολυμερισμού (6 λεπτά).

Στεφάνη
και γέφυρα

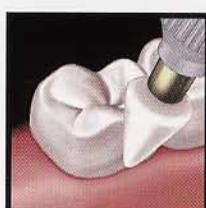

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

11. Ολοκληρώνετε τη λείανση και τη στήλβωση με το σύστημα Enhance.

Στεφάνη
και γέφυρα

Αξονες

Γέφυρες τύπου
Meryland

Άξονες

Όψεις

Ένθετα
και Επένθετα

Στεφάνη
και γέφυρα

Στεφάνη
και γέφυρα

Γέφυρες τύπου
Meryland



ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ

1. Αφήνετε το De Trey Conditioner 36% στην εναπομείνουσα αδμαντίνη (και στην οδοντίνη αν χρειάζεται) επί 15''. Ξεπλένετε επί 10''. Στεγνώνετε με κοφτές κινήσεις βαμβακολαβίδας χωρίς τριβή για να μην αφυδατώσετε το δόντι.



CALIBRA

7. Τοποθετείτε το μίγμα κονίας Calibra στην υποδοχή του άξονα με το κατάλληλο εργαλείο.



ΜΙΓΜΑ PRIME & BOND NT με SELF CURE ACTIVATOR

2. Τοποθετείτε 1-2 σταγόνες Prime & Bond NT και ίση ποσότητα Αυτοπολυμεριζόμενου Ενεργοποιητή σε μπωλ μίξης και αναμιγνύετε με ένα καθαρό πινέλο.



ΕΔΡΑΣΗ ΑΞΟΝΑ

8. Εφαρμόζετε αμέσως τον άξονα. Πιέζετε μέχρι ο άξονας να σταθεροποιηθεί.



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ

3. Επαλείφετε το μίγμα Prime & Bond NT στην παρασκευή του άξονα έτσι ώστε να μπαίνει στο στόμιο της άφθονη ποσότητα. Η επιφάνεια πρέπει να παραμείνει υγρή επί 20'', οπότε μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε επιπλέον συγκολλητικό. Στεγνώνετε ήπια επί 5''. Η επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη, στιλπνή εμφάνιση. Διαφρετικά, επαναλαμβάνετε την επάλειψη. Φωτοπολυμερίζετε το Prime & Bond NT επί 10''.



ΠΡΟ-ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

9. Όταν σταθεροποιηθεί ο άξονας, προ-φωτοπολυμερίζετε επί 10'' ώστε να σκληρυνθεί η περίσσεια της κονίας και να καθαρίζεται εύκολα.

To Calibra autopolymerizes at full power in 6:00.



4. Τοποθετείτε ένα επίστρωμα από το μίγμα Prime & Bond NT στον άξονα. Στεγνώνετε αμέσως επί 5''.




ΠΕΡΙΣΣΕΙΣ

10. Απομακρύνετε την περίσσεια κονίας από τα οριά.



CALIBRA+ΚΑΤΑΛΥΤΗ

5. Τοποθετείτε ίσες ποσότητες της ανοιχτής απόχρωσης βάσης Calibra και του καταλύτη Κανονικού Ιεώδους σε μπλοκ μίξης. Αναμιγνύετε επί 20-30'' μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιόμορφο.

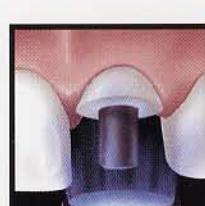

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

11. Φωτοπολυμερίζετε τον άξονα επί 20''.



CALIBRA ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ

6. Απλώνετε το μίγμα κονίας Calibra στον άξονα.



ΚΟΛΟΒΩΜΑ

12. Συνεχίζετε με το κτίσιμο κολοβώματος.

Γέφυρες τύπου Maryland



ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ

1. Αφήνετε το De Trey Conditioner 36% στην εναπομείνουσα αδαμαντίνη επί 15''. Ξεπλένετε επί 10''. Στεγνώνετε με κοφτές κινήσεις βαμβακολαβίδας χωρίς τριβή για να μην αφυδατώσετε το δόντι.



CALIBRA ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ

8. Τοποθετείτε ένα λεπτό στρώμα κονίας Calibra σε ολόκληρες τις εσωτερικές επιφάνειες συγκόλλησης της αποκατάστασης.

Όψεις



ΜΙΓΜΑ PRIME & BOND NT με SELF CURE ACTIVATOR


2. Τοποθετείτε 1-2 σταγόνες Prime & Bond NT και ίση ποσότητα Αυτοπολυμερίζομενου Ενεργοποιητή σε μπαλ μίχης και αναμιγνύετε με ένα καθαρό πινέλο.



ΕΔΡΑΣΗ

9. Εφαρμόζετε αργά την αποκατάσταση και πιέζετε ελαφρά μέχρι να σταθεροποιηθεί. Το Calibra αυτοπολυμερίζεται πλήρως σε 6:00.

Ένθετα
και Επένθετα

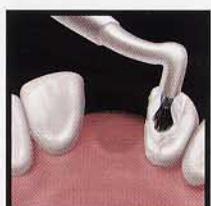

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ

3. Επαλείψετε άφθονη ποσότητα από το μίγμα Prime & Bond NT στο δόντι μέχρι να υγρανθούν καλά οι επιφάνεις του. Αυτές οι επιφάνεις πρέπει να παραμείνουν υγρές επί 20'', οπότε μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε επιπλέον συγκολλητικό.



ΠΡΟ-ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

10. Προ-φωτοπολυμερίζετε τα όρια της αποκατάστασης επί 10'' ώστε να σκληρυνθεί η περίσσεια της κονίας και να καθαρίζεται εύκολα.

Στεφάνη
και γέφυρα



ΣΤΕΓΝΩΜΑ


4. Στεγνώνετε ήπια επί 5''. Η επιφάνεια πρέπει να έχει ομοιόμορφη, στιλπνή εμφάνιση. Διαφορετικά, επαναλαμβάνετε την επάλειψη.



ΠΕΡΙΣΣΕΙΣ

11. Απομακρύνετε την περίσσεια κονίας από τα όρια.

Στεφάνη
και γέφυρα

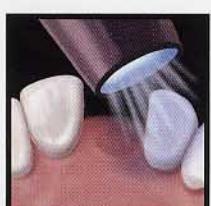

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ


5. Φωτοπολυμερίζετε το Prime & Bond NT επί 10''.



ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ

12. Φωτοπολυμερίζετε όλα τα όρια της αποκατάστασης επί 20''.

Υπενθύμιση : Το Calibra αυτοπολυμερίζεται πλήρως σε 6:00.

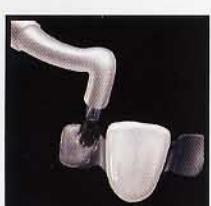

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

6. Τοποθετείτε ένα επίστρωμα από το μίγμα Prime & Bond NT στα φτερά της Γέφυρας Τύπου Maryland. Στεγνώνετε αμέσως επί 5''.



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

13. Ολοκληρώνετε τη λείανση και τη στήλβωση με το Σύστημα Enhance.

Άξονες



CALIBRA ΒΑΣΗ+ΚΑΤΑΛΥΤΗ

7. Τοποθετείτε ίσες ποσότητες της επιθυμητής απόχρωσης βάσης Calibra και του καταλύτη Κανονικού ή Υψηλού Ιεώδους σε μπλοκ μίχης. Αναμιγνύετε επί 20-30'' μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιόμορφο.

Ελάχιστος χρόνος εργασίας : 2:30.

Γέφυρες τύπου
Maryland

NewDent Ε.Π.Ε.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Εγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 270 550, 270 850

Fax: 2310 270 850



ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Φειδιππίδου 43, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7489 031, 210 7488 640, 210 7792 584, 210 7711 747

Fax: 210 7489 032 e-mail: info@faratzi.gr

DENTSPLY
DETREY